

Recomendaciones de montaje

Este producto no está esterilizado, debe tratarlo con precaución, como si estuviese contaminado, usando guantes, y algún medio de esterilización y desinfección adecuado antes de montarlo y usarlo. Este medio por si solo no representa protección ante el coronavirus, es sólo un complemento adicional a sus EPIs.

- La visera tiene tres partes, el soporte de plástico duro, el acetato y el elástico.
- El soporte de plástico duro está hecho con plástico fundido, por lo que pueden quedar pequeñas imperfecciones o filamentos de plástico muy fino, puede quitarlos con lija o unas tijeras por ejemplo. Revise que no le roza nada al ponerse el plástico en la frente.
- Se recomienda montar el acetato en formato horizontal, que cubre mejor los laterales de la cara, para ello hay que cortarle aproximadamente 1cm de largo.
- El elástico se anuda en los agujeros del extremo del soporte.



1. Después de esterilizar y desinfectar la visera, separa suavemente las dos solapas entre las que hay que introducir el acetato.



2. Introduce la lámina de acetato empezando por una esquina del lado más largo, y terminando por la opuesta.



3. Vuelve a colocar las dos solapas en la misma posición de forma que sujeten el acetato.